




全自動翻身輔助器

機型：SL-BBA00M

使用說明書

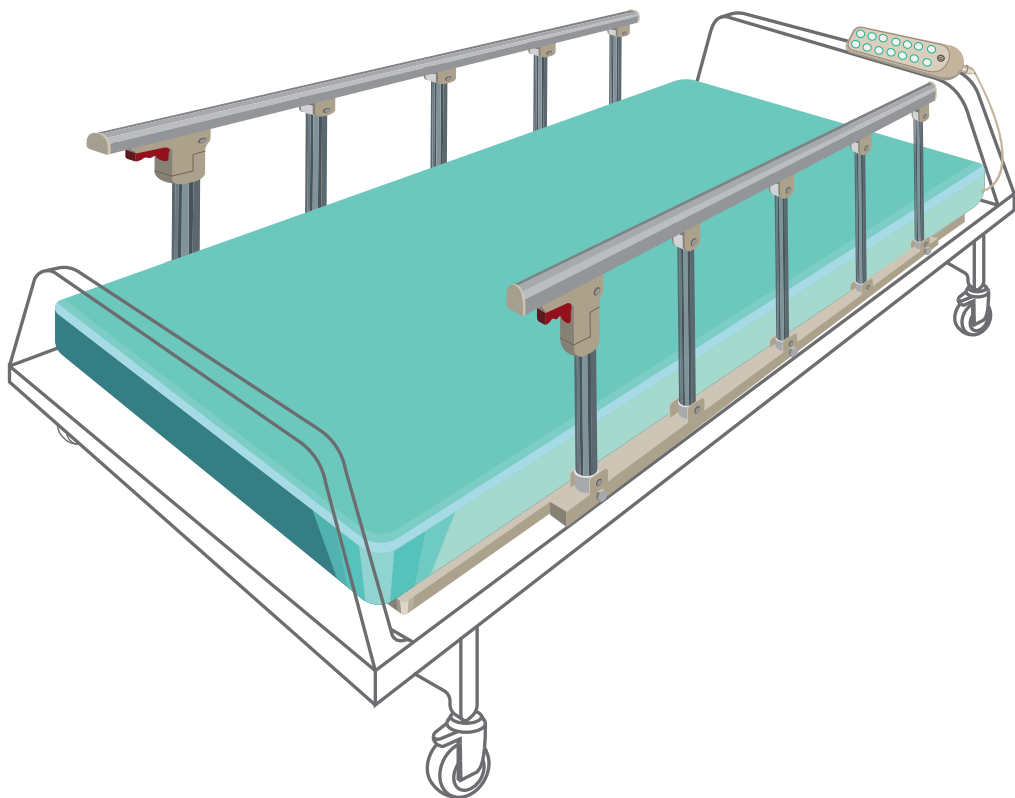

感謝您購買SOLONIC全自動翻身輔助器。

使用本產品前，請先詳細閱讀使用說明書，以便您正確使用本產品。閱讀後請妥善保存，以備日後查閱。

圖片僅供參考，產品的顏色、附件配置如有變動，請以購買的實物為準。

目錄

	一、使用前安全警告	3
	二、產品簡介	4
	2.1 產品內容物清單	4
	2.2 遙控器按鈕功能介紹	5
	2.3 床墊功能介紹	6
	三、產品安裝步驟	7
	四、操作說明	9
	※ 操作前注意事項	9
	※ 操作方式須知	9
	4.1 護欄操作	10
	4.2 遙控器使用需求與功能選擇	10
	五、清潔和維護保養	14
	六、故障排除與檢修	15
	七、規格參數	16
	八、保修服務	17






使用前安全警告

- ◆ 使用過程中，出現冒煙或產生異味時，請立即切斷電源，拔除插頭，以免造成火災。
- ◆ 電源線及電源插頭受損，或插座鬆動時，切勿使用本產品。
- ◆ 產品周遭請勿放置油氣等易燃爆炸物品。
- ◆ 請勿破壞電源線、加工、大力拉扯、過度彎曲、壓重物、加長電源線等動作，以免造成電源線斷裂等不可預期之故障意外。
- ◆ 裝卸時，請務必先將電源關閉，並將電源插頭拔離插座，避免受傷。
- ◆ 拔除插頭時，請注意手部是否乾燥，並且應按住插頭拔出，勿硬扯電源線。
- ◆ 在火源附近、高溫(40度C以上)環境、廢紙、易燃氣體、重油污、易被水淋的場所時，請勿使用。
- ◆ 機器應遠離兒童處使用，操作機器時禁止兒童觸碰，以免造成不可預期之傷害與損壞。
- ◆ 請勿使用化學液體或溶劑清洗本產品。
- ◆ 請勿使用延長線及外接插頭，並且不與其他電器共用插座，以免發生危險。
- ◆ 請保持電源線、遙控器、插頭的乾燥，以免造成危險。
- ◆ 機器運轉時，請勿將手伸入翻身架，以免造成夾傷。
- ◆ 操作機器前，請勿手動掀開翻身架，以免造成夾傷或機器損壞。
- ◆ 使用時請確認翻身輔助架要放置的床架上方有無異物。

產品簡介

1. 產品內容物清單


- (1). 翻身輔助架(含:控制器+電動推桿 X 4) X 1
- (2). 有線遙控器 X 1
- (3). 高分子床墊 X 1
- (4). 床罩 X 1
- (5). 護欄 X 2
- (6). 螺絲組 (螺絲 X 6+螺帽 X 6+墊片 X 12) X 1
- (7). 開口板手 X 2
- (8). ㄇ型限位 X 4

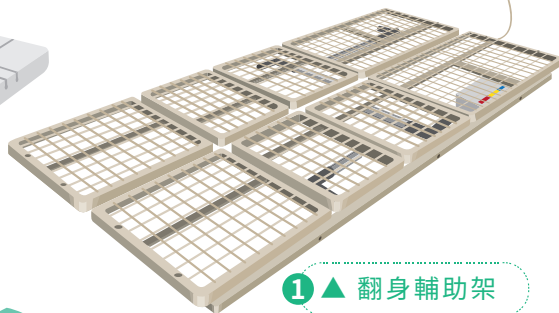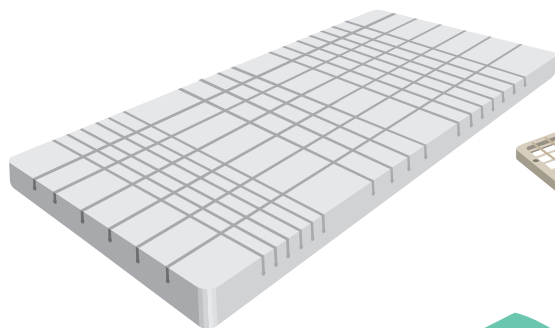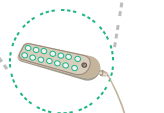

3 ▲ 床墊



7 ▲ 開口板手

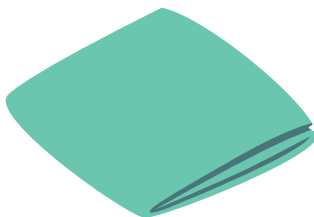


4 ▲ 床罩



5 ▲ 護欄




8 ▲ ㄇ型限位

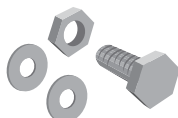


6 ▲ 螺絲組

2. 遙控器按鈕功能介紹：

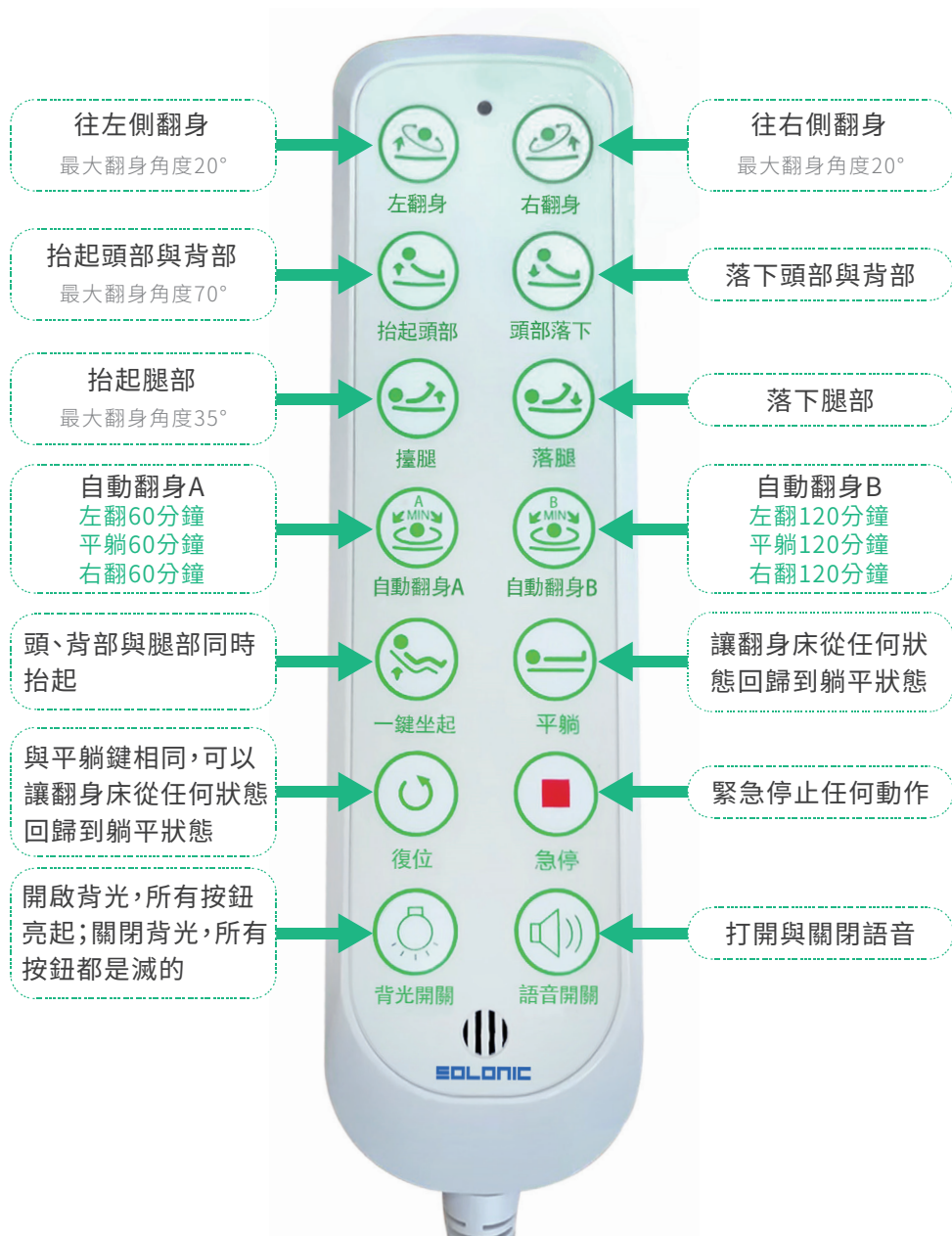


3. 床墊功能介紹：

使用高分子材料製作，透氣良好，保持肌膚乾爽

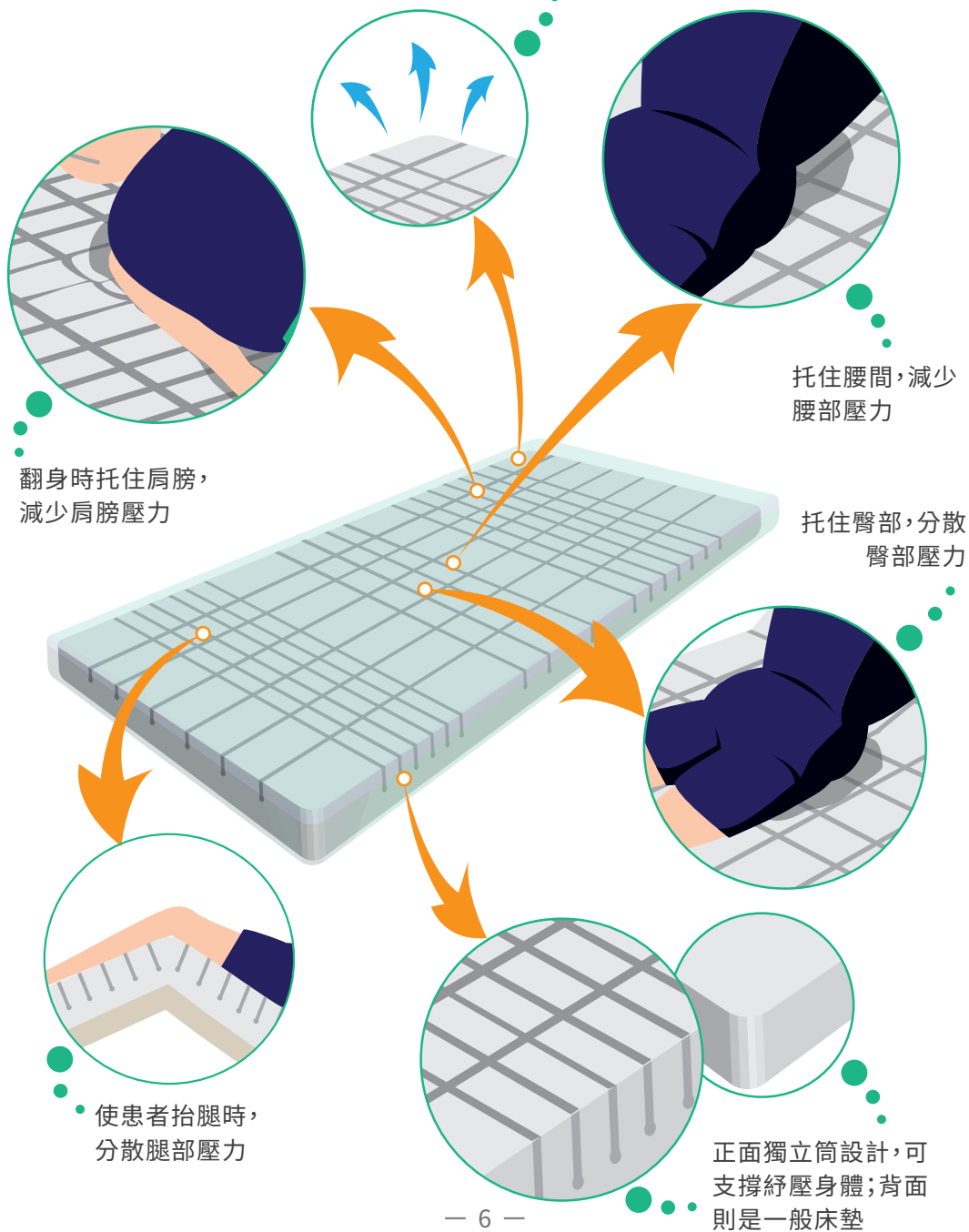


產品安裝步驟

※請注意：
如原本的床架已有護欄，可
不必再安裝本產品護欄。

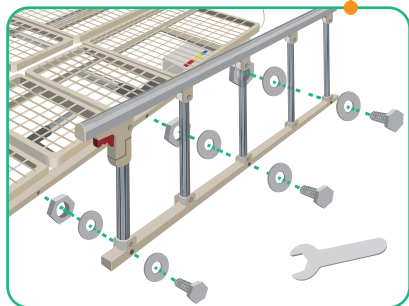


將護欄以螺絲組鎖固至翻身輔助架旁。

01 安裝護欄

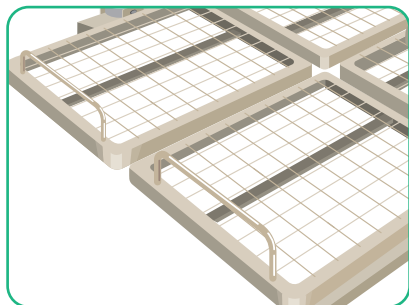


將限位鐵鉤置於輔助架床尾、床頭端。

02 放置鐵鉤

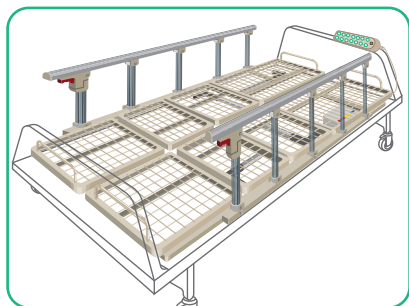


將安裝好護欄的翻身輔助架置於床架。

03 置於床架

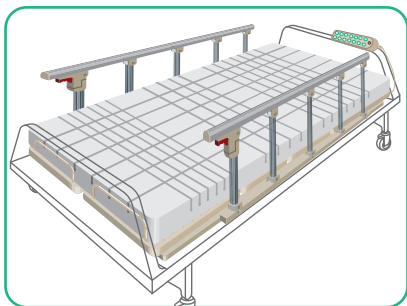


將高分子床墊置於翻身輔助架上。

04 放置床墊

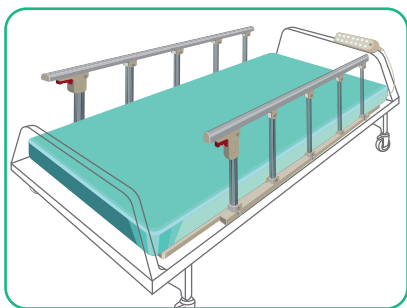

將床單四角套住床墊、限位鐵鉤與輔助架翻起部分。

05 安裝床單

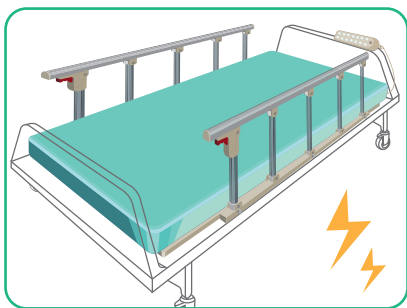

插上110~230V之間的電源即可使用。

06 通電使用



操作說明


※. 操作前注意事項：



操作翻身架的任何設定時，患者的手請平放於床墊上，勿垂落在護欄外，以免使用時夾傷手



操作翻身架前，請將遙控器連接線安放於輔助架的空隙中，以免被輔助架壓住，造成短路

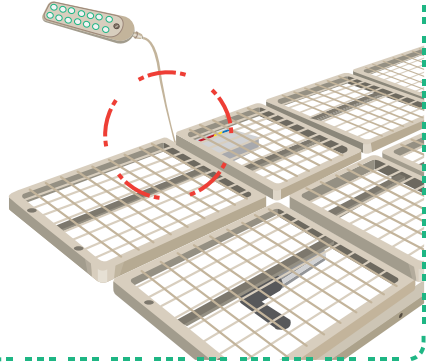

※. 操作方式須知：

遙控器操作方式




「自動翻身A」及「自動翻身B」需要 **長按3秒** 才可啟用。其它按鈕操作均採 **短按** 方式。

※注意


短按及長按為重要操作，請務必遵行，誤按將可能造成機器之故障或損壞。

自動模式切換其他動作時

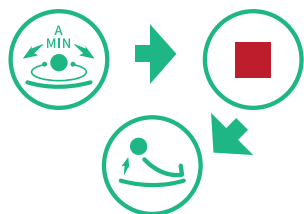

從**自動模式**更換其他動作時，必需先按**急停鈕**，才可再按其他動作功能鈕。

變換動作時

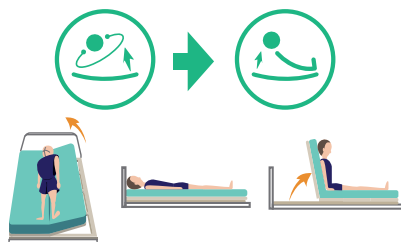

變換動作時，上一步動作會先躺平。請等待躺平動作完成的提示音響起，再按1次所需動作。

需要調整翻身角度時



左翻身、右翻身、抬起頭部、擡腿、一鍵坐起抬升至最大角度會自動停止。

如需調整翻身角度，請在抬升到所需角度後，再按1下**當下所選動作按鈕**，或按**急停鈕**，即可停止抬升。若角度還不夠高，可再按一次按鈕，以此類推。

翻身動作無限時




如不手動停止翻身功能，**「自動翻身A」與「自動翻身B」**將會無限循環翻身動作。

左翻身、右翻身、抬起頭部、擡腿、一鍵坐起等動作則是無限時維持翻身動作。

1. 護欄操作：


往前推即可升起護欄，如需放下護欄，需先按壓紅色安全鈕，再向後拉，即可放下護欄。

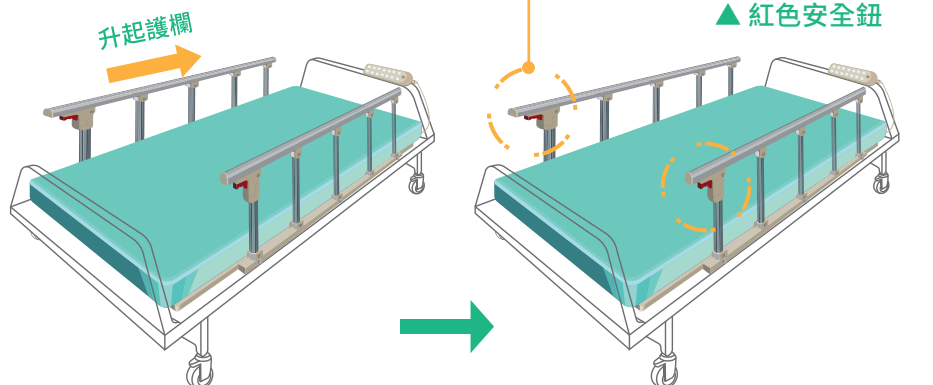

2. 遙控器使用需求與功能選擇：

無人看顧，又有患者翻身需求時

左翻60分鐘 左翻120分鐘
平躺60分鐘 平躺120分鐘
右翻60分鐘 右翻120分鐘

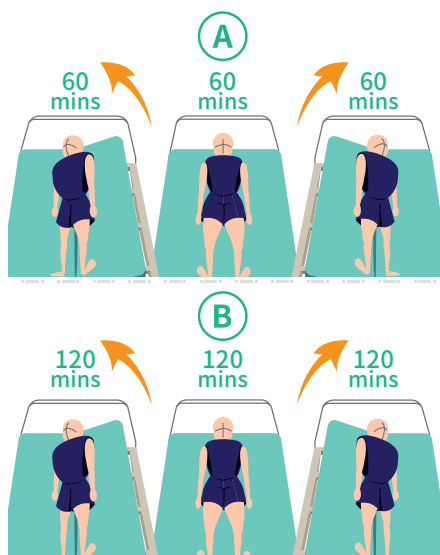


按**自動翻身A** 或 **自動翻身B**

此兩個按鈕需長按3秒。從自動模式更換其他動作時，請先按**急停鈕**。

此功能具有時間記憶功能，會自動記憶上次做到的翻身動作與進行時間，下次使用該功能時，會自動接續動作與翻身時間。


需要長時間維持側翻身動作時

左右翻身最大角度 20°

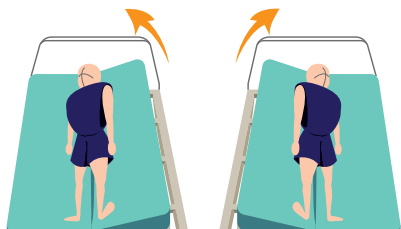


按左翻身或右翻身

需要抽痰、餵食、活動腰部

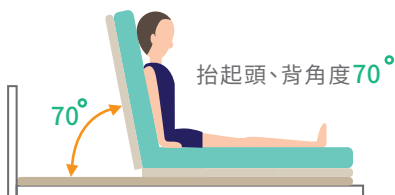


按抬起頭部，要躺下時按頭部落下

需要活動腿部關節時

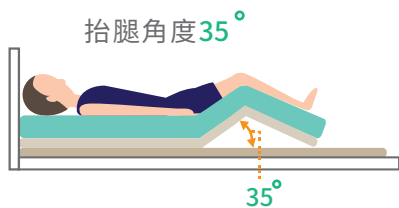


按擡腿，要躺下時按落腿

想要同時活動腿部和腰部時

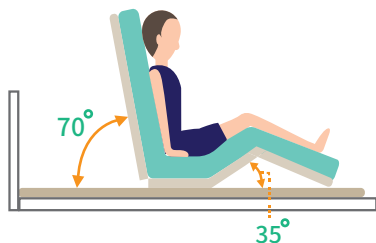


按一鍵坐起

回歸躺平狀態、降低翻身角度

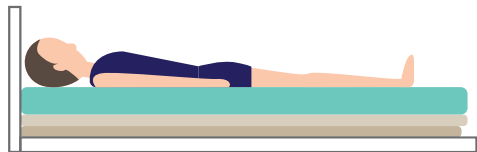

可按復位或平躺

有突發狀況，需立即暫停運作時

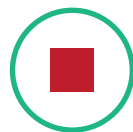

按急停

在昏暗空間使用，看不清按鈕文字時



按背光開關


無法看清按鈕文字圖示時，需要語音提示



按語音開關




清潔 & 維護保養

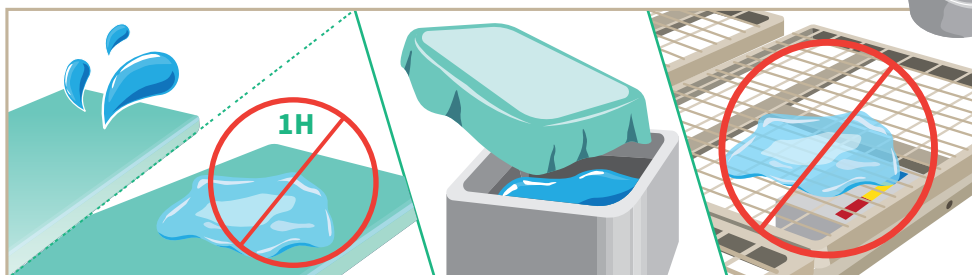

床單僅為防潑水，請勿將液體長時間停留在床面上，避免液體滲入床墊，造成發霉異味。

床單建議2~7天清洗1次，清洗時僅使用中性洗滌劑清洗即可。


嚴禁將水及腐蝕性液體與操控器接觸

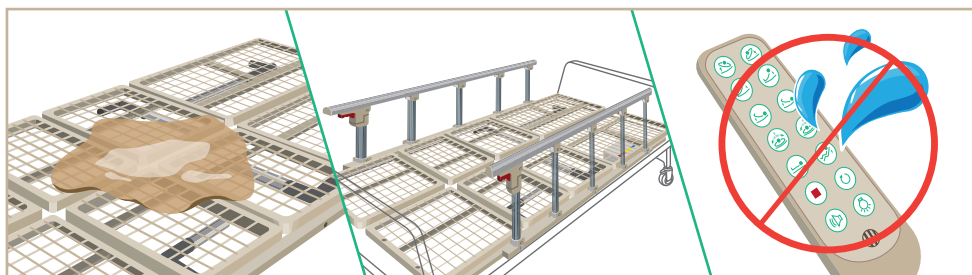

輔助架表面有髒汙時，請使用無腐蝕性醫用消毒水和清水擦拭、陰乾即可。

翻身輔助架未使用時，請將架面放平。

請勿將遙控器重摔、浸水，或存放於潮濕環境下。


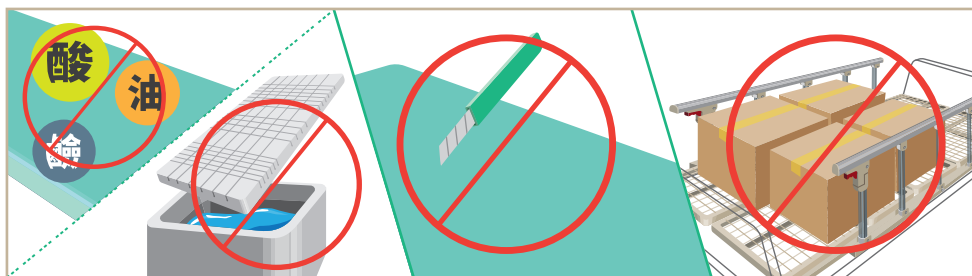


床墊嚴禁使用酸性、鹼性、油性等腐蝕性化學物質接觸。亦不可清洗。

請勿用尖銳物品刺劃床墊，以免影響床墊功能。

翻身輔助架請勿堆積大量重物。

故障排除與檢修

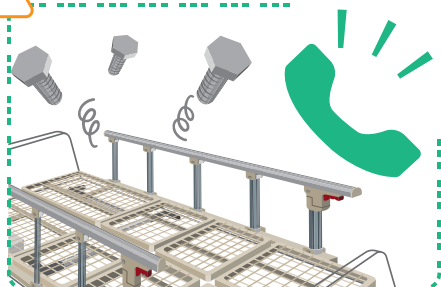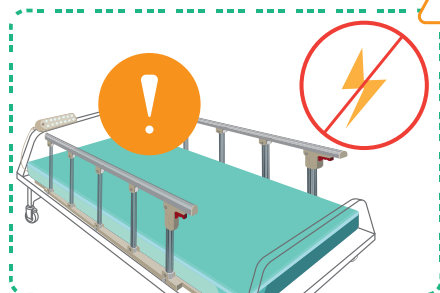

※請注意：
若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。切勿在故障情況下繼續使用或自行修理，以免發生危險。

※請注意：
請定時檢查輔助翻身架，如有五金零件鬆動、生鏽，及出現機器轉動部位不靈活運轉時，請及時聯絡客服。

※發生故障異常時，請先檢視是否為下列狀況：

常見問題	原因分析	解決方法
遙控器按下功能鈕無動作	1. 電源插座與插頭接觸不良	檢查電源插座是否通電
	2. 遙控器插頭鬆動	將遙控器插頭拔下，重新插緊
	3. 電機插頭鬆動	拔下對應功能電機插頭，重新插緊
	4. 按法錯誤	除「自動翻身A」及「自動翻身B」外，其餘動作均為短按操作
	▲ 以上都完成，狀況仍在	將插頭移除後，再重新通電
	5. 電機損壞、電動推桿損壞	請聯絡客服送修產品
遙控器僅「自動翻身A」及「自動翻身B」無動作、或動作錯誤	● 按法錯誤	「自動翻身A」及「自動翻身B」需長按3秒才會動作

客服電話：(04) 2236-4660



碩享客服
LINE



規格參數

全自動翻身輔助器	
機體尺寸(大)	212公分×85公分×6公分
機體尺寸(中)	190公分×85公分×6公分
機體尺寸(小)	183公分×85公分×6公分
機體重量	約50公斤
最大承受重量	150公斤(一鍵坐起功能因負載功率,限重80公斤)
輔助架材質	合金鋼
床墊材質	PU高分子材料
床墊尺寸	190公分×85公分×10公分
額定電壓	110 V ~ 230 V
額定頻率	50 ~ 60 HZ
額定最大功率	100 W
商品原產地	台灣
機型	

銷售商：碩享科技股份有限公司

服務地址：台中市北屯區北平路四段19號

服務電話：(04) 2236-4660



保修服務

產品保證書		
產品名稱	全自動翻身輔助器	
機型	SL-BBA00M	
購買日期	西元 年 月 日	
客戶姓名	客戶地址：	
	客戶電話：	
購買商家	商家地址：	
	商家電話：	

感謝您購買本公司的產品。為維護您的權益，請因詳細填寫保證書資料，加蓋購買處店章，並妥善保存購買時的發票與明細。即享有本公司自購買日起的免費服務。

若需維修時，請主動提示本保證書與購買時發票，以享受權益。

在保修期間內，凡屬正常使用情況下，因產品本身品質問題引起的故障，我公司負責給予免費維修。

※服務保固範圍：

◇全自動翻身輔助架免費保修一年，保固期起始日期以產品發票日期為準。

※注意事項：

◇高分子床墊與床單因屬個人衛生用品，經拆封後即不予退換貨。

◇本產品在誤用、不當存儲、更改、再製造包裝或者加工本產品而產生的缺陷，不在保修範圍內。

◇在適用的法律允許範圍內，本產品保證書包含了有關產品的所有其保證，不存在其他任何承諾，包括試銷和特定的臨床適用性。

◇在任何情況下，本公司不對任何在處理過程中或者使用本產品的過程中間接的附帶的而引起的損害承擔任何責任。

※如有以下情形之一者，雖在保證期間內，亦不予以免費維修服務：

◇因不可抗力之天地災害、戰爭、火災或人為引起之故障或損毀。

◇因錯誤使用之過失，導致商品故障或損毀。

◇擅自改裝本產品或經外人檢修，導致商品故障或損毀。

◇違反說明書安全使用與警告，導致產品發生不良狀況。

◇購買發票等證明經塗改，保修即行失效。



SOLONIC

產品若有技術更改，會編進新版說明書中，恕不另行通知，產品外觀、顏色如有改動，請以實物為準，本說明書若有印刷錯誤或內容上的誤解，本公司保留最終解釋權。